

bright Hand Driver

牙科种植用扳手 使用说明书

产品信息

产品名称:牙科种植用扳手

型号规格:BHD-1.0、BHD-2.0

预期用途:用于牙科种植过程

生产日期:

使用期限:非无菌产品,不适用

本产品为牙科种植用扳手,在牙科种植过程使用。

无源产品。非无菌提供,可重复使用。

其中,BHD-1.0是弯头与尾部手柄不可分离的一体式产品。

BHD-2.0可以更换尾部手柄(GTC-20、GTC-35、GTC-TL),

分别为:最大扭矩20Ncm、最大扭矩35Ncm、无最大扭矩。

还可在尾部手柄末端安装辅助把手(GAP-35),辅助用户旋转操作。

2.操作方法

- (1)选择规格适配的牙科手术器械,将其与机头及扳手进行连接。
- (2)连接完成后,沿轴向轻轻拉动手术器械,确认其已正确固定。
- (3)顺时针旋转手柄可拧紧器械,逆时针旋转手柄可松开器械。
- (4)使用完毕后,按住机头背面的凹槽,取下手术器械。

4.使用注意事项

- (1)必须严格遵守本使用说明书中的所有说明。
- (2)请勿对产品进行本说明书说明范围外的拆卸或改装。
- (3)使用前请务必检查产品状态,保障使用安全。
- (4)使用本设备时,请务必做好患者口腔组织的防护。
- (5)机头的灭菌必须采用制造商推荐的方式进行。
- (6)每次使用后务必进行润滑处理。
- (7)请勿使产品掉落或撞击地面。
- (8)如需对产品进行维修或保养,请联系经销商或生产厂家。

1.使用前准备

- (1)使用前请检查产品是否存在任何破损。
- (2)若使用前机头未灭菌的话,必须先进行灭菌后,才能使用。
 - 1)灭菌方式:高压蒸汽灭菌(符合ISO 177665-1、ISO 177665-2 标准)
 - 2)灭菌条件
 - ① 温度:121℃
 - ② 灭菌时长:15 分钟
 - ③ 干燥时长:30 分钟

3.使用后的储存与维护

- (1)操作完成后,请务必按以下步骤进行润滑处理:
 - 1 用酒精纱布清洁整套产品后,打开弯头、机头及齿轮组件的盖子,向注油孔滴入 2 滴润滑油。
 - 2 合上盖子,转动转轴数次使润滑油均匀分布,随后擦去多余的油脂。
- (2)请于室温下储存,避免阳光直射及潮湿环境。
- (3)请存放于无灰尘等异物的环境中。
- (4)产品使用后、储存前,务必清除表面异物。

5.备案证及企业信息

备案证/产品技术要求编号:国械备20260154

备案人/生产企业

名称:吉诺斯株式会社 GENOSS Co., Ltd

住所:12F, 76, Changnyong-daero 256beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
Republic of Korea

生产地址:

1. 4F, 5F, D-Factory, 56, Changnyong-daero
256beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea

2. Part of the 14F, 76 Changnyong-daero,
256beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea

联系方式:031-888-5100

售后服务单位/代理人

名称:登腾(上海)医疗器械有限公司

住所:上海市浦东新区周浦镇芙蓉花路500弄16号
三层、四层

联系方式:021-58786737